



FreeStyle Libre 3

JATKUVA GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ

Pikaopas



Käyttöönoton yleiskatsaus

Täydelliset järjestelmän ohjeet ja tiedot ovat käyttäjän ohjekirjassa.



1 Aseta sensori ihollesi



2 Aloita uusi sensori lukulaitteella

Odota 60 minuuttia, kunnes järjestelmä käynnistyy

3 Käyttöönottajakson jälkeen voit käyttää lukulaitetta glukoosin tarkistamiseen

1 Aseta sensori ihollesi

Valmistautuminen


VAIHE 1



Valitse kohta käsivarren takaosasta.


Huomautus: Vältä arpia, luomia, raskausarpia, kyhmyjä ja insuliinin pistoskohtia. Vaihtele kohtia käyttökertojen välillä ihoärsytyksen estämiseksi. Ota huomioon käyttömukavuus ja harrastamasi liikunta.

VAIHE 2

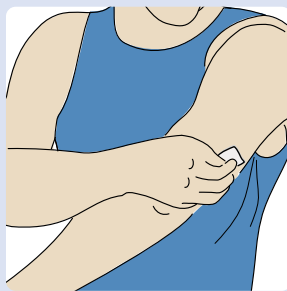

Pese kohta tavallisella saippualla, kuivaa ja puhdista sitten alkoholipyyhkeellä. Anna kohdan kuivua, ennen kuin jatkat.

VAIHE 3

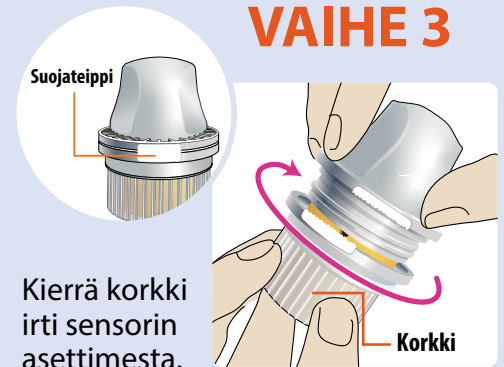


Kierrä korkki irti sensorin asettimesta.

HUOMIO:

- ÄLÄ käytä, jos sensorin asetin on vaurioitunut tai jos suojateippi osoittaa, että sensorin asetin on jo avattu.
- ÄLÄ aseta korkkia takaisin paikoilleen, sillä se voi vahingoittaa sensoria.
- ÄLÄ kosketa sensorin asettimen sisäpuolta, sillä se sisältää neulan.

Aseta sensori


VAIHE 4

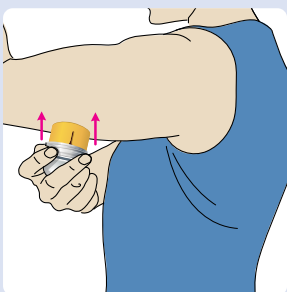

Aseta sensorin asetin kohdan päälle ja aseta sensori painamalla asetinta lujasti alaspäin.

HUOMIO: Sensorin asetinta EI saa painaa, ennen kuin se on asetettu valmistellun kohdan päälle, jotta ei aiheudu tahattomia seurauksia tai vammaa.

VAIHE 5

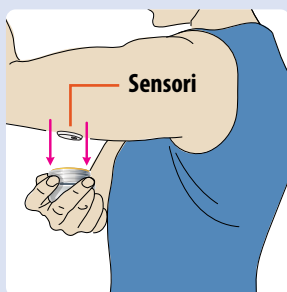

Vedä sensorin asetin varovasti irti iholta.

VAIHE 6



Varmista, että sensori on kunnolla kiinni. Aseta korkki takaisin sensorin asettimeen. Hävitä käytetty sensorin asetin. Katso käyttöoppaan *Hävittäminen*-kohdan tiedot.

2 Aloita uusi sensori lukulaitteella


VAIHE 1



Käynnistä lukulaite painamalla Koti-painiketta. Kosketa sitten **Aloita uusi sensori** -kohtaa, kun näet tämän näytön.

Huomautus: Jos käytät lukulaitetta ensimmäistä kertaa, noudata kehotteita lukulaitteen valmistelusta.


VAIHE 2

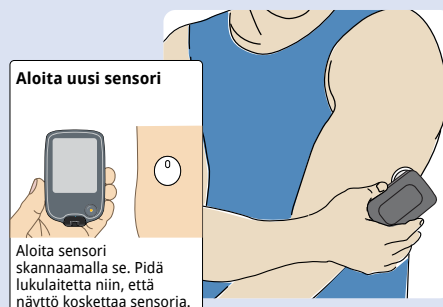

Pidä lukulaitetta niin, että näyttö koskettaa sensoria, jolloin sensori käynnistyy. Saatat joutua siirtelemään lukulaitetta hitaasti, kunnes löydät oikean paikan.

Huomautus: Ennen kuin aloitat sensorin, valitse laite, jota haluat käyttää. Jos aloitat sensorin lukulaitteella, et voi käyttää sovellusta glukoosin tarkistamiseen tai hälytysten vastaanottamiseen.

VAIHE 3

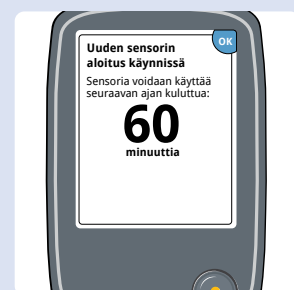

Tarkista tärkeät tiedot näytöstä. Lukulaite näyttää glukoosiarvosi automaattisesti 60 minuutin kuluttua.




3 Tarkasta glukoosi

VAIHE 1



Kytke lukulaite päälle painamalla Koti-painiketta ja kosketa sitten **Katso glukoosia** oletusnäytöstä. **Huomautus:** Lukulaite saa glukoosilukemat automaattisesti, kun se on 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä sensorista.

VAIHE 2

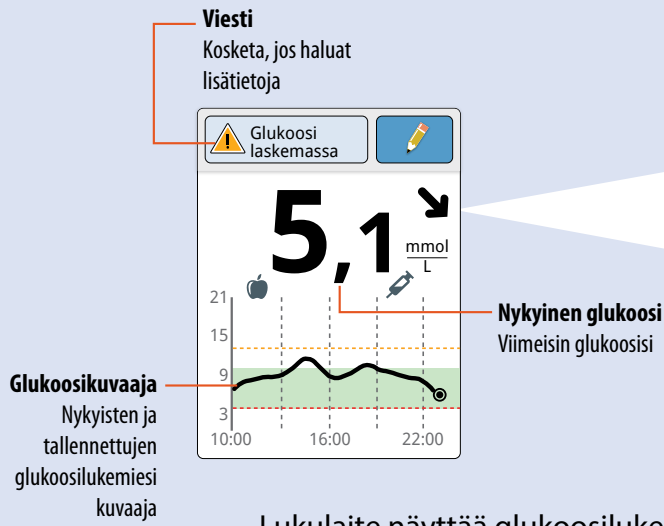

Lukulaite näyttää glukoosilukemasi. Tämä sisältää nykyisen glukoosisi, glukoosin suuntanuolen ja glukoosikuvaajan.

Glukoosin suuntanuoli	
Suunta, johon glukoosiarvo on menossa	
Nuoli	Selitys
↑	Glukoosi nousee nopeasti
↗	Glukoosi nousee
→	Glukoosi muuttuu hitaasti
↘	Glukoosi laskee
↓	Glukoosi laskee nopeasti

Hälytysten asettaminen


Sensori on automaattisesti yhteydessä lukulaitteen kanssa ja voi antaa glukoosihälytyksiä, jos päätät kytkeä ne **PÄÄLLE**. Hälytykset ovat oletusarvoisesti **POIS** käytöstä. Kytke hälytykset **PÄÄLLE** tai muuta niiden asetuksia noudattamalla seuraavia vaiheita.

VAIHE 1




Siirry oletusnäyttöön painamalla Koti-painiketta. Valitse .

VAIHE 2

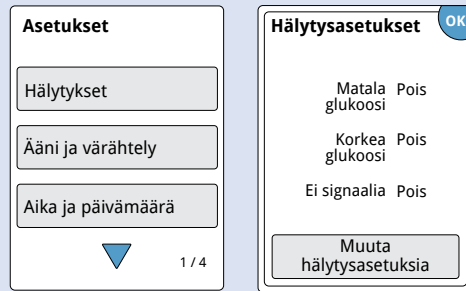


Valitse **Hälytykset** ja sen jälkeen **Muuta hälytysasetuksia**.

VAIHE 3

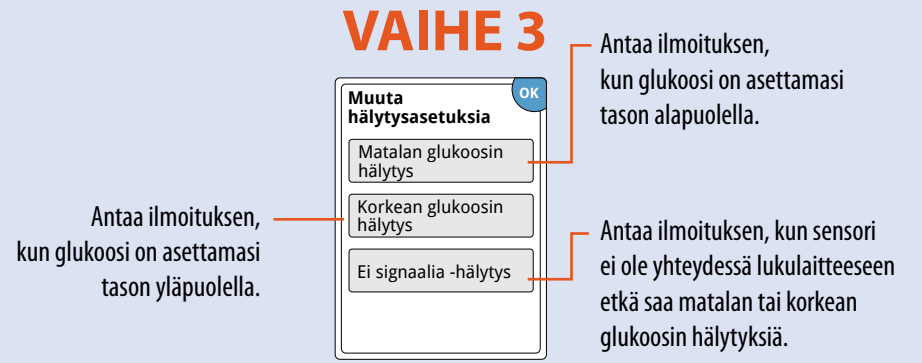


Valitse ja aseta hälytykset. Tallenna valitsemalla **valmis**. **Huomautus:** Ei signaalia -hälytys kytkeytyy päälle automaattisesti, kun kytket matalan tai korkean glukoosin hälytyksen käyttöön ensimmäistä kertaa. Kytke se pois valitsemalla **Ei signaalia -hälytys**.

Hälytysten käyttäminen

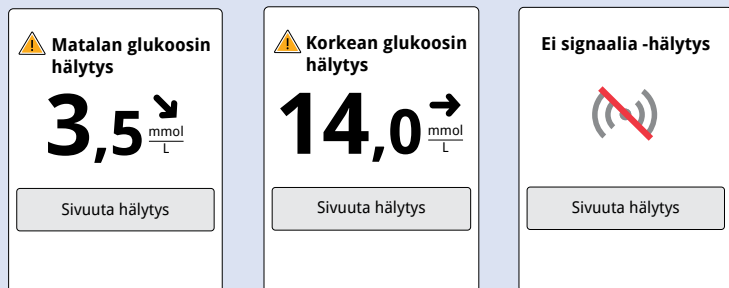

Hylkää hälytys koskettamalla **Sivuuta hälytys** tai painamalla Koti-painiketta.

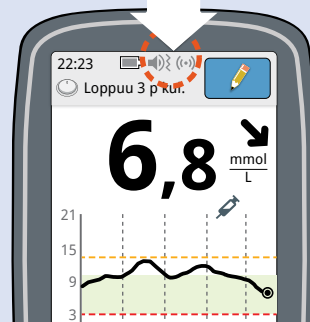

Ääni/värähtely ja signaalin tilan näkyminen oletusnäytössä ja joissakin tulosnäytöissä.

Symboli	Selitys
	Ääni ja värähtely KÄYTTÖSSÄ
	Ääni ja värähtely POIS
	Sensorilla on yhteys lukulaitteeseen
	Sensorilla ei ole yhteyttä lukulaitteeseen

Katso muut symbolit käyttöoppaasta.