


## 4 helppoa mittausvaihetta



1 Avaa kärjen suojus. Mittari kytkeytyy päälle.



2 Tee pisto lansettikynällä sormenpään saadaksesi veripisaran.

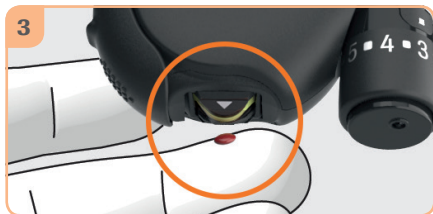

3 Imeytä veripisara testialueelle.




4 Lue tulos ja sulje kärjen suojus. Mittari sammuu.

## 4 mittauksen perusasiaa




1 Ennen kuin aloitat, **pese kätesi** lämpimällä vedellä ja saippualla, huuhtele hyvin ja kuivaa huolellisesti puhtaalla pyyheliinalla.

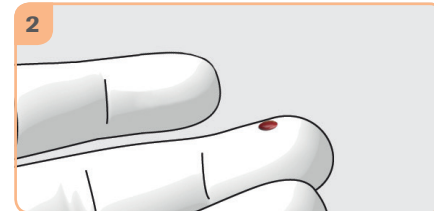

2 Käytä aina pientä ja **hyvin muodostunutta** veripisaraa. Älä anna pisaran levitä.



3 **Imeytä veripisara** testialueen keskelle **kevyesti ja vakaasti**. Älä paina testialuetta sormeen kiinni.

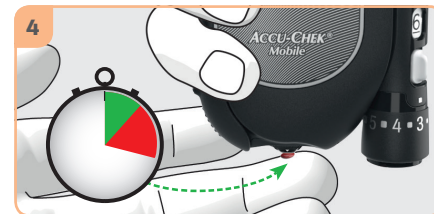

4 **Imeytä verinäyte testialueelle heti** sen jälkeen, kun pisara on muodostunut. Vie sormi pois testialueelta heti, kun näyttöön ilmestyy Mittausta suoritetaan ja kuulet äänimerkin (jos käytössä).

Vain asianmukainen käsittely johtaa virheettömiin mittauksiloksiin, jotka mahdollistavat oikeiden hoitosuunnitelmien tekemisen. Sen vuoksi pyydämme, että noudatat näitä ohjeita huolellisesti.



Skannaa oheinen QR-koodi tai käy [www.youtube.com](http://www.youtube.com) -sivuilla (käytä hakusanoina *Mobile oikea mittaaminen*) katsoaksesi uusimman Accu-Chek Mobile -opetusvideon oikeasta mittaamisesta.



### Koe mahdollisuutesi.

Lisätietoja Accu-Chek Mobile -käyttöohjeesta.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE ja FASTCLIX ovat Roche'n rekisteröityjä tuotemerkkejä.  
© 2014 Roche Diagnostics

[www.accu-chek.fi](http://www.accu-chek.fi)

Roche Diabetes Care

PL 160

02180 ESPOO



ACCU-CHEK®

## Uuden kasetin asettaminen

kun kaikki 50 testiä on käytetty




1 Avaa kärjen suojus työntämällä se perille saakka.



2 Työnnä kasettikotelon liukunäppäintä ylöspäin.



3 Poista käytetty kasetti mittarista.

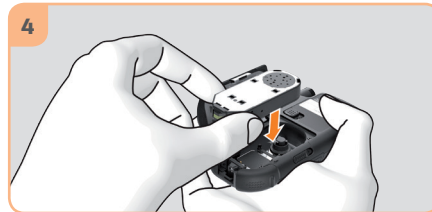

4 Aseta uusi testikasetti mittariin. Sulje kasettikotelon kansi ja kärjen suojus.

## Lansettirullan vaihtaminen

kun kaikki 6 lansettia on käytetty



1 Poista kärjen suojus ja käytetty lansettirulla.



2 Aseta uusi lansettirulla valkoinen osa edellä ja aseta kärkiosa takaisin paikalleen.



3 Valitse sopiva pistosyvyys kääntämällä kärkiosaa. Aloita keskinkertaisella pistosyvyydellä, kuten 3:lla.



4 Näytteenoton jälkeen lataa uusi lansetti työntämällä vipua ① :n osoittamaan suuntaan ja sitten takaisin ② .

Accu-Chek® Mobile

Liuskatonta mittaamista.  
Rajoituksetonta elämää.

